

## УХОД ЗА ГЛЮКОМЕТРОМ «АЙЧЕК» («iCheck»)

При использовании глюкометра АйЧек («iCheck») для исследования образцов крови разных людей, например, в условиях работы медицинского учреждения, для дезинфекции прибора рекомендуется протирать наружные поверхности салфетками, пропитанными 0,55 % раствором гипохлорита натрия, или 10 % раствор гипохлорита натрия после каждого использования.

В соответствии с местными нормативами могут быть использованы эквивалентные дез. средства, активные в отношении ВИЧ, гепатит В и других патогенных вирусов, передающихся с кровью в соответствии с методическими указаниями к каждому используемому препарату.

### **ВНИМАНИЕ:**

Прежде чем пользоваться дезинфицирующими средствами, отличными от указанных выше, необходимо обязательно проконсультироваться, позвонив на горячую линию компании по тел 8-800-555-49-00, так как другие дез. средства могут испортить прибор.

- ✓ Убедитесь, что при использовании химического дезинфицирующего средства соблюдаются инструкции по использованию дез. средства.
- ✓ Не погружайте прибор в какие-либо жидкости и не держите его под струей проточной воды.
- ✓ Не допускайте попадания жидкостей, грязи, пыли, крови, контрольного раствора в гнездо для тест-полоски и в порт данных.
- ✓ Не засовывайте ткань для протирки в гнездо для тест-полоски и в порт данных.
- ✓ Не распыляйте чистящий раствор на прибор.